

Kurzanleitung - Universal IPPB Schlauchsystem


Short guide - IPPB circuit universal



Entnehmen Sie das IPPB Schlauchsystem der Verpackung.
Unpack the IPPB circuit.

Richten Sie die Anschlüsse des Verneblers und des Ausatemventils zu einer Seite aus und schließen den grünen und den transparenten Schlauch gemäß Abbildung an den Vernebler bzw. das Ausatemventil an.

Bring the connectors of the nebulizer and the expiration valve into line on one side and connect the green and the transparent tube to the nebulizer and the expiration valve respectively as shown.

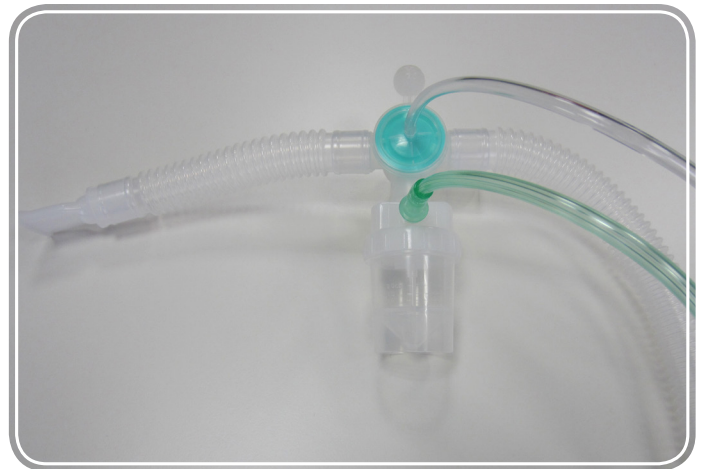

Schließen Sie das IPPB Schlauchsystem gemäß Abbildung an das Atemtherapiegerät an. Eine Verwechslung ist aufgrund unterschiedlicher Größen nicht möglich.

Connect the IPPB circuit to the breathing therapy device as shown. Because of different tube sizes it is not possible to connect wrongly.